

Référence :**A730**Nom du produit :**SEPTILIN+ LINGET'****DEFINITION :**

Lingettes désinfectantes, sans rinçage pour l'antisepsie des mains et la désinfection des surfaces avec ou sans contact alimentaire, idéales pour les secteurs d'activité suivants : milieux paramédicaux et médicaux, transport sanitaire, agroalimentaire, institutions, collectivités, loisirs, soins esthétiques ...

Conforme à la réglementation des produits de nettoyage des surfaces et des matériaux au contact des denrées alimentaires (arrêté français du 08/09/1999 modifié).

Avantages : rapidité d'action, séchage rapide et sans traces, large spectre d'action, efficacité prouvée en laboratoire COFRAC.

UTILISATION / TYPE DE PREPARATION :

Produit biocide prêt à l'emploi

TP1 : Hygiène humaine.

TP2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

TP4 : Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

COMPOSITION :

Substance active biocide : Ethanol (CAS 64-17-5) : 660.10 g/kg

Non tissé : Spunbonded blanc : 22 g/m²

CARACTERISTIQUES / SPECIFICATION DE LA SOLUTION D'IMPREGNATION :

Aspect : Liquide fluide
Couleur : Incolore
Odeur : Alcoolisée
pH : 8,25 +/- 0,75
Point d'éclair : 22.10°C
Point d'ébullition : >35°C
Densité : 0.854-0.874

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION D'IMPREGNATION :

ACTIVITE	NORMES	CONDITION	SOUCHES	TEMPS DE CONTACT
Bactéricide	EN 1276 (v. 2019)	Propreté	Listeria et Salmonelle	30 secondes
	EN 13697 (v. 2019)	Propreté	Listeria et Salmonelle	2 minutes
	EN 13727 (v. 2015)	Propreté	--	30 secondes
	EN 16615 (v.2015)	Propreté	--	5 minutes
	EN 1500 (v. 2013)		--	2 x 45 secondes
Mycobactéries	EN 14348 (v. 2005)	Propreté	Mycobacterium avium Mycobacterium terrae	1 minute
Levuricide	EN 1650 (v. 2019)	Propreté	Candida albicans	30 secondes
	EN 1650 (v. 2019)	Propreté	Aspergillus brasiliensis	5 minutes
	EN 13624 (v. 2021)	Propreté	Candida albicans	30 secondes
	EN 13624 (v. 2013)	Propreté	Aspergillus brasiliensis	1 minute

Version	Date	Historique des modifications	Rédaction	Approbation
4	14/06/2006	Mise à jour	Archez Conseil	Archez Conseil /Responsable QHSE
12	19/03/202	Mise à jour	Dossier Central	Sistina Conseils/Responsable QHSE

	EN 13697 (v. 2019)	Propreté	Candida albicans Aspergillus brasiliensis	5 minutes
	EN 16615 (v. 2015)	Propreté	Candida albicans	5 minutes
Virucide	EN 14476 (v.2019)	Propreté	Coronavirus BCoV (virus modèle)	30 secondes
	EN 14476 (v. 2019)	Propreté	Influenza A (H1N1)	30 secondes
	EN 14476 (v. 2019)	Propreté	Rotavirus	30 secondes
	EN 14476 (v. 2019)	Propreté	Norovirus	1 minute
	EN 14476 (v. 2019)	Propreté	Adénovirus	1 minute
	EN 14476 (V. 2019)	Propreté	Vaccine spectre d'activité couvrant les virus enveloppés dont : Herpès, Hépatite B, Hépatite C, VIH...	1 minute

INSTRUCTION D'EMPLOI :

Tirez horizontalement une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe.

Séparer en tirant d'un coup sec. Si la lingette suivante n'avait pas amorcé sa sortie, ouvrir la boîte et réamorcer par la lingette du centre du rouleau. Bien refermer le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes. Ne pas utiliser de lingette sèche.

Renouveler l'opération selon le protocole d'hygiène en place.









L'utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de nettoyage (préalable à toute désinfection), ni du protocole de stérilisation des instruments (pouvant être stérilisés par un procédé approprié).

Ce produit réservé à la désinfection des surfaces lisses et non poreuses.

Il est compatible avec la plupart des matériaux, sauf plexiglas. Procéder à un essai préalable.

Ne pas utiliser avec d'autres produits.

L'emploi simultané ou successif de désinfectants est à éviter.

Mode d'emploi	Usage sur les mains :	<p>1. Pour amorcer la première lingette, retirer le couvercle de la boîte et tirer la première lingette par le centre du rouleau, avec les mains propres. Remettre le couvercle en faisant passer la lingette par l'ouverture dans le couvercle.</p> 	<p>2. Frotter une lingette pendant 45s. Renouveler une seconde fois. Bien refermer le conditionnement après usage pour éviter le dessèchement des lingettes.</p> 	<p>3. Ne pas rincer.</p> 	<p>4. Éliminer la lingette usagée dans un conteneur à déchets.</p> 
	Usage sur les surfaces :	<p>1. Pour amorcer la première lingette, retirer le couvercle de la boîte et tirer la première lingette par le centre du rouleau, avec les mains propres. Remettre le couvercle en faisant passer la lingette par l'ouverture dans le couvercle.</p> 	<p>2. Appliquer la lingette de manière à humidifier la surface à désinfecter. Laisser agir 5 minutes. Bien refermer le conditionnement après usage pour éviter le dessèchement des lingettes.</p> 	<p>3. Ne pas rincer.</p> 	<p>4. Éliminer la lingette usagée dans un conteneur à déchets.</p> 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Fiche de Données de Sécurité disponible sur site www.apei.asso.fr

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. En cas de réutilisation, risque de contamination.

**DANGER**

H225	Liquide et vapeurs très inflammables
H319	Provoque une sévère irritation des yeux
P102	Tenir hors de portée des enfants
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337+P313	Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
P501	Éliminer le contenu/réceptacle dans un conteneur à déchets.
UFI - V50X-Y8TX-H00Q-67EU	

CONSERVATION :

Avant rupture du film de protection, les lingettes se conservent 24 mois à l'abri de la chaleur, dans des conditions normales de température. Vérifier la date limite d'utilisation figurant sur le contenant. Dès ouverture de la boîte, utiliser dans le mois. Stocker hors gel à des températures inférieures à 40°C. Ne pas exposer au soleil.

ELIMINATION :

Les déchets doivent être éliminés par un organisme agréé. Ne pas jeter le produit dans l'environnement, ni dans les toilettes.

CONDITIONNEMENT :

A 730 - Carton de 6 boîtes de 100 lingettes imprégnées