

Référence :**V861**Nom du produit :**GARROT TOURNIQUET**Conditionnement : A l'unitéConditionné et distribué par :

Le Verdier – Entreprise adaptée
540 avenue Georges Pompidou – BP 2
18200 SAINT-AMAND-MONTROND CEDEX
Tél. + 33 (0)2 48 61 50 90 - Fax + 33 (0)2 48 61 50 99

Fournisseur : FARMORRéférence : Garrot Tourniquet – Réf. GAR 1501 TO

Version	Date	Historique des modifications	Rédaction	Approbation
1	30/01/2024	Création	Dossier Central	Responsable QHSE
2	03/06/2026	Mise à jour	Dossier Central	Responsable QHSE



Garrot Tourniquet

■ Gamme Urgence & Accessoires

RÉFÉRENCE : **GAR 1501 TO**



Dimensions :

Dépliées : 95 x 4 cm

Pliées : 15 x 4 cm



Poids :

80 g



DESCRIPTION

• Très simple d'utilisation, ce garrot tourniquet réutilisable, est un matériel d'urgence utilisé pour arrêter une hémorragie externe. Il est destiné à interrompre la circulation du sang dans un membre — membre supérieur (bras, avant-bras, main) ou membre inférieur (cuisse, jambe, pied).

Il peut être posé d'une seule main, être placé dans plusieurs positions, et utilisé dans toutes les conditions météorologiques.

MATIERE

Polyester & nylon

EMBALLAGE

Emballé individuellement avec notice d'utilisation

Fourni avec un marqueur indélébile



INDICATION D'UTILISATION

- 1 : Appliquez le garrot à proximité de la zone de saignement et placer le membre blessé à travers la boucle.
- 2 : Tirez la bande très serrée et fixez-la sur elle-même.
- 3 : Collez la bande autour du membre.
- 4 : Tournez la tige jusqu'à ce que le saignement s'arrête.
- 5 : Placez la tige à l'intérieur du clip et verrouillez.
- 6 : Vérifiez l'état de saignement, appliquez un serrage supplémentaire à côté du garrot et réévaluez si le saignement persiste.
- 7 : Collez la bande sur la tige à l'intérieur du clip autour du membre.
- 8 : Sécurisez la tige et la bande avec la sangle, transportez réévaluez, & noter l'heure à laquelle le garrot a été posé sur la sangle blanche avec le marqueur indélébile.

Dispositif Médical de classe I, conforme au règlement européen 2017/745 soumis à obligation de traçabilité.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to Art. 19 of Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices

Manufacturer:

GAUKE Healthcare Co., Ltd.

No. 82, TuanFeng Avenue, TuanFeng Town, TuanFeng ,
Huang Gang City, Hubei Province, 438800, P.R. China.

Trademark:



SRN:

CN-MF-000013784

European Representative:

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse8
80807 Munich, Germany

SRN:

DE-AR-000000087

Trade name:

Tourniquet

Product name:

Tourniquet

Intended use

It is intended to bind and compress the limb of bodies
to stop bleeding.

Basic UDI:

69514547318VH

Classification acc. to MDR Ax. VIII:

Class I, Rule 1

**Applied Standard & Common
Specification:**

ISO 13485-2016

Conformity assessment procedure:

Annex II + Annex III of MDR

CE certificate No.:

N.A.

We, the manufacturer, herewith declare under our sole responsibility that the above-mentioned products meet the provisions of the Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices (MDR). All supporting documentations are retained under the premises of the manufacturer.

Matthew Zhang

Name and function :

Matthew Zhang / General manager



Place, date:

Huanggang, 21. 04. 2022



Marquer indélébile noir

■ Gamme **Urgence & Accessoires**

RÉFÉRENCE : **FEU 1501 GR**

COMPOSITION

DESCRIPTION

Marqueur permanent avec encre vive et durable à séchage rapide, imperméable, résistant aux taches et à la décoloration

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.